

Instruksjoner for innsamling av avføringsprøver før 4. behandlingssyklus (1-4 dager før oppstart), og etter 1 år / i henhold til instruks

Bio-Me avføringspakke inneholder:

- 1 x «filterkort» for påføring av prøve
- 1 x trepinne - for å spre prøven på kortet
- 2 x oppsamlingsenhet for å feste på toalettsetet
- 1 x forseglingspose (aluminium) med tørkemiddel
- 1 x ferdig frankert returkonvolutt

Annet du vil ha behov for:

- En penn - til å merke dato, etc. på filterkortet
- Et sted der filterkortet kan tørkes og lagres i minst to timer.

Prosedyre for innsamling av to avføringsprøve:

1. Samle avføring ved å følge anvisningen på oppsamlingsenheten uten at den kommer i kontakt med toalett vann eller urin.

Merk: Prøver som er på 1 eller 7 på Bristol Stool Chart skal ikke samles inn. Dersom dette gjelder din prøve, vent til neste mulige tidspunkt hvor prøven karakteriseres fra 2 til 6 for å gjøre innsamlingen.

2. Fyll inn Bristol Stool Score (bruk Bristol Stool Chart skjema til høyre som guide), tidstabell (antall timer siden dagen startet) og dato for prøvetakning (bilde 1 og 2). Om prøven tas på natten eller like etter du har stått opp skriver du 0 timer.
3. Bruk trepinnen til å ta prøven fra midten i det innsamlede materiale. Fordel et tynt lag over hele ruten (bilde 3). Prøven skal ikke inneholde klumper. Obs: Mindre er bedre – ikke påfør et tykt lag.
4. Etter påføring skal kortet lufttørkes. Plasser kortet (bilde 4) på et egnet sted i minimum 2 timer.
5. Brett filterkortet og legg i forseglingsposen (aluminium).

Lagring og levering av avføringsprøve:


Etter at prøven er tørr, brettes kortet og lagres i forseglingsposen sammen med tørkemiddelet.

Plasser den forseglede posen i vedlagte ferdig frankert returkonvolutt og send den til returadressen for prøven så raskt som mulig og senest innen 3 dager. Konvoluttet oppbevares i romtemperatur inntil den sendes.

Bristol Stool Chart

Type 1		Adskilte, harde klumper, som nøtter –vanskelig å presse ut
Type 2		Pøselignende, men klumpete
Type 3		Pøselignende, men med sprekker på overflaten
Type 4		Som en myk pølse, jevn over det hele
Type 5		Myke enkeltklumper med tydelige kanter
Type 6		Bløt avføring uten tydelige kanter
Type 7		Vandig avføring uten tydelige klumper

BSS Score: _____ 1
Følg BRUKSANVISNING. Verdi 1-7: 4
.....
Hvor lang tid fra du stod opp til prøven ble tatt: 3 timer

 **Bio-Me**
Medisinske Prøver
REK ref. 10055
Prøvesett for avføringsprøver
Dato for prøve (dd/mm/åå): 29/06/20

